

LCTHERMOMETER®



CARACTÉRISTIQUES

Code produit : LCT 01 /
Conditionnement : 1 x 12 unités /
Description : thermomètres LCD incassables /
Diamètre : 32 mm /
Variations : de 35 °C à 38 °C avec incréments de 0,5 °C /
Précision : +/- 0,3 °C (pour affichage vert) /

LE LCTHERMOMETER® PERMET DE FACILEMENT VÉRIFIER LES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE DANS LES BOÎTES DE CULTURE AINSI QUE LA STABILITÉ ET L'UNIFORMITÉ DE LA TEMPÉRATURE DES SURFACES CHAUFFÉES.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Vérification des variations de température dans les boîtes de culture /
Coller le dispositif adhésif LCTHERMOMETER® à l'intérieur d'une boîte de culture. Mettre le milieu de culture et de l'huile minérale dans cette boîte puis l'équilibrer dans un incubateur. Simuler le procédé de manipulation à l'aide de la boîte calibrée et contrôler le LCTHERMOMETER® afin de vérifier toute chute éventuelle de température du milieu de culture.

Vérification de la stabilité de la température des surfaces chauffées /
Coller le LCTHERMOMETER® sur la surface de tout dispositif chauffant dont vous souhaitez vérifier la stabilité thermique. Contrôler l'affichage de température de façon continue pour vérifier la stabilité de la surface chauffée.

COMMENT LIRE LE LCTHERMOMETER?

L'affichage passe du rouge au vert puis au bleu ; l'affichage vert marque la température réelle.

ÉVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE À LA LUMIÈRE DU SOLEIL ET AUX RAYONS UV