


I.U.I® SONDE INTRA-UTÉRINE

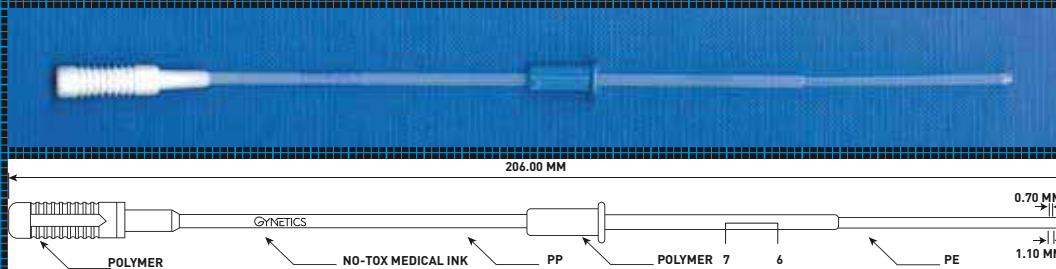

CARACTÉRISTIQUES/////

- Repère coulissant /
- Cathéter double /
- Fermeture cervicale optimale /
- Repère bleu à 6 et 7 cm de l'extrémité distale /
- Deux ouvertures latérales sur la sonde afin d'avoir une injection optimale du sperme /
- Repère (flèche) sur le manchon précisant la position des ouvertures latérales /

AFIN QUE LE FOND DE L'UTÉRUS NE SOIT PAS ATTEINT PENDANT L'INJECTION, MESURER LA HAUTEUR UTÉRINE UN CYCLE AVANT L'INSÉMINATION. LE REPÈRE BLEU COULISSANT SERA POSITIONNÉ À 0,5-1 cm DU FOND UTÉRIN.

TYPE

Tube ID 150 mm
Tube OD 185 mm
Ouverture latérale 0,70 mm

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Boîte de 25 unités

Réf.4220

STÉRILISATION

Stérilisée aux rayons Gamma

MODE D'UTILISATION

- Fixer une seringue sur la sonde (de préférence 1 ou 2 ml),
- Avant de charger la sonde, aspirer 1cc d'air dans la seringue,
- Positionner le repère coulissant selon la hauteur utérine,
- Introduire la sonde,
- Positionner le repère (flèche) sur le manchon de la sonde vers le haut ; les ouvertures se trouvent ainsi face aux ostiums tubaires,
- Injecter doucement le sperme,
- L'air chargé dans la sonde assure que toute la préparation de sperme est expulsée pendant l'injection,
- Si un doute subsiste sur l'expulsion de la totalité du sperme, recharger la seringue d'air et injecter à nouveau
- Retirer la sonde et vérifier l'expulsion totale du sperme.

L'association de l'extrémité souple et flexible de la sonde avec le corps solide permet d'utiliser la sonde intra-utérine dans la majorité des inséminations.