


# EMTRAC SET®

CATHÉTER POUR TRANSFERT DIFFICILE D'EMBRYONS AVEC REPÈRE COULISSANT

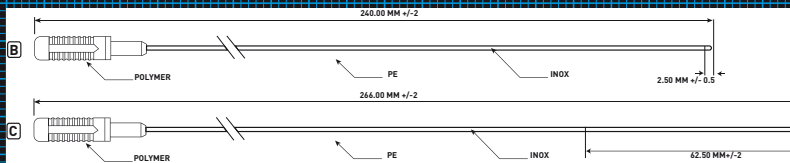

## CARACTÉRISTIQUES

- EMTRAC® A (MANCHON BLANC)  
Repère coulissant délimitant la hauteur utérine /  
Corps solide du cathéter avec une extrémité plus souple permettant d'utiliser l'EMTRAC®A dans la majorité des transferts /  
Repère bleu à 6 et 7 cm de l'extrémité distale /
- EMTRAC® B (MANCHON BLEU)  
Mandrin flexible pour rigidifier et préformer l'EMTRAC® A /  
Tuyau flexible dépassant légèrement l'extrémité distale de l'EMTRAC®A pour faciliter le passage du col /
- EMTRAC® C (MANCHON ROSE)  
Cathéter de transfert avec guide /  
Une marque sur le cathéter indique quand l'EMTRAC® C a rejoint l'extrémité de l'EMTRAC® A /

## TYPE

### - CATHÉTER AVEC GUIDE

TUBE ID 1,30 mm  
TUBE OO 1,60 mm

### - MANDRIN

TUBE ID 0,70 mm  
TUBE OO 1,00 mm

### - CATHÉTER DE TRANSFERT

TUBE OO 1,00 mm  
TUBE ID 0,50 mm

Réf.4219 A

+/- 0,050

+/- 0,050

Réf.4219 B

+/- 0,050

+/- 0,050

Réf.4219 C

+/- 0,050

+/- 0,020

## MODE D'UTILISATION

- Repère coulissant placé au préalable selon la hauteur utérine,
- Introduire l'EMTRAC® A muni du mandrin (EMTRAC® B),
- Retirer le mandrin quand l'EMTRAC® A est placé selon le repère,
- Introduire le cathéter de transfert,
- Déposer les embryons,
- Retirer le Set et vérifier que tous les embryons ont été expulsés.

## STÉRILISATION

Stérilisé aux rayons Gamma

## RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Boîte de 25 unités

Réf.4219SET

Également disponible :

Emtrac Set "ECHOGENE"

Réf.4219SET-0

Boîte de 25 unités